

Desinfektionsmidler til tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite-produkter

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Tilbagekaldte ultralydssystemer og dockingstationer	2
Tilbagekaldte standardtransducere, A-H	8
Tilbagekaldte standardtransducere, I-Z	12
Tilbagekaldte specialtransducere	17
Tilbagekaldt tilbehør	21
Rengøring af transducere	26

Indledning

FUJIFILM SonoSite tester desinfektionsmidler og -apparater til anvendelse med deres tilbagekaldte systemer, transducere og tilbehør. Undtagen for TEE og kirurgiske transducere vises resultaterne i nedenstående tabeller. Se ultralydssystemets brugervejledning vedr. anvisninger i rengøring og desinfektion og vedr. yderligere advarsler og forsigtighedsregler.

- Der henvises til kortet *TEE plejeanvisninger* og *Vejledning til kirurgisk transducer* for rengørings- og desinfektionsmidler, der er kompatible med TEE og kirurgiske transducere.
- Hvis du ønsker oplysninger om aktuelle FUJIFILM SonoSite-produkter, henvises der til *brugervejledningen om rengøring og desinfektion af FUJIFILM SonoSite-produkter*.

ADVARSEL: De nævnte desinfektionsmidler anbefales af FUJIFILM SonoSite til sikker anvendelse med FUJIFILM SonoSite-produkter.
Se desinfektionsvejledningerne på mærkaten angående effektiv desinficering og korrekt klinisk brug.

Dette dokument indeholder ikke følgende vedtægtsbestemte oplysninger om desinfektionsmidler:

- EPA-registrering
- FDA 510(k)-godkendelse (væskesteriliserende desinfektionsmiddel eller højniveaudesinfektionsmiddel)
- CE-mærkning

Før der benyttes et desinfektionsmiddel, skal det bekræftes, at dets lovgivningsmæssige status passer til din jurisdiktion og anvendelse. Kontrollér udløbsdatoerne for kemikalier.

Ved bortskaffelse af kemikalier skal producentens anbefalinger følges, og EPA-bestemmelserne skal overholdes.

Tilbagekaldte ultralydssystemer og dockingstationer

Du kan desinficere den yvendige overflade på ultralydssystemet ved brug af et anbefalet desinfektionsmiddel.

Tablet 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite ultralydssystemer og dockingstationer

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
AbcoCide 14				✓
Airkem A-33	✓	✓	✓	✓
Alkacid			✓	
Alkazyme			✓	
Alkohol, ethanol				
Anios-servietter	✓			✓
Aniosym DD1 (5 %)				
Anioxyde 1000	✓		✓	
Aquatabs (1000 PPM)			✓	
Ascend			✓	✓
Asepti-HB				
Asepti-servietter		✓		
Asepti-servietter II				
Asepti-Steryl				

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
Bacillocid rasant			✓	✓
Bacoban WB			✓	
Banicide				✓
Baxedin Pre-Op	✓	✓		
BioText Micrylium			✓	
CaviWipes	✓	✓	✓	
Cidalkan	✓	✓		
Cidalkan Lingettes	✓	✓	✓	
Cidex	✓	✓		
Cidex 14			✓	✓
Cidex OPA		✓		✓
Cidex Plus	✓	✓	✓	✓
Cleanisept-serviet				✓
Clinell Universal-renseservietter	✓	✓		
Clorox bakteriedræbende servietter		✓		
Control III	✓	✓		

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
Coverage bakteriedræbende overfladeservietter				
Coverage Plus bakteriedræbende overfladeservietter		✓		
Coverage Spray				
DentaSept			✓	
Discide Ultra-servietter				
DisOPA				✓
Dispatch-servietter	✓			
Dynacide PA	✓	✓	✓	✓
Echo Clean Lingettes				
End-Bac II	✓	✓		
Endosporine	✓			✓
EndoZime AW Plus			✓	✓
Envirocide				
Enzol			✓	✓
Expose II			✓	

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
Gluco Chlor-servietter	✓			
Hexanios			✓	✓
Hi Tor Plus			✓	
Hibiclens			✓	✓
Hydrogenperoxid (3 %)				
Incidin Plus (1 %)	✓	✓	✓	
Incidin Plus (3 %)	✓		✓	
Korsolex Extra			✓	✓
MadaCide 1				
Medzyme	✓	✓		
MetriCide 14			✓	✓
MetriCide 28			✓	✓
MetriCide OPA Plus		✓		✓
MetriZyme			✓	✓
Mikrobac forte			✓	✓
Mikrobac forte 2 %				

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
Mikrobac-servietter				
Nu-Cidex	✓	✓		
Nuclean			✓	✓
PerCept RTU-servietter	✓	✓		
Rely+On PeraSafe		✓		✓
Salvanios pH 7	✓		✓	✓
Sani-Cloth AF				
Sani-Cloth HB				
Sani-Cloth Plus	✓			✓
Sani-Cloth-servietter med blegemiddel	✓			
Sekusept aktiv		✓		
Simple Chlor				
Sporicidin			✓	
Steranios 2 %	✓	✓		✓
Steranios 20 %	✓	✓		✓
Super Sani-Cloth				

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
T-Spray	✓	✓		
T-Spray II	✓	✓	✓	✓
TASK 105			✓	✓
Trigene Advance-servietter	✓	✓		✓
Tristel Solo	✓	✓	✓	✓
Tristel-servietter	✓	✓		
Vådserviet-desinficering	✓	✓	✓	✓
Virex 256				
Virex II 256			✓	
Virex TB				
Virox 5-servietter	✓	✓	✓	
Virufen			✓	✓
Wavicide -01				✓
Wavicide -06			✓	
Wet Task-servietter	✓	✓		
Wex-Cide		✓	✓	✓

Tabel 1: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite ultralydssystemer og dockingstationer (fortsat)

Desinfektionsmiddel	MicroMaxx (system og dockingstation)	TITAN (system og dockingstation)	SonoSite 180PLUS	iLook15 iLook25
Wipes Plus desinficerende servietter	✓	✓		
Wood Wyant Ultra-servietter				

✓ - Godkendt til brug

Tilbagekaldte standardtransducere, A-H

Du kan desinficere transduceren, scanningsoverfladen og ledningen ved brug af et anbefalet desinfektionsmiddel eller -apparat. Rengør transduceren inden desinficering for at fjerne eventuelle partikler eller legemsvæsker. Se "[Sådan rengøres en transducer](#)" på side 26.

De tilbagekaldte transducere, som er angivet nedenfor, svarer til dem, som er angivet i tabellen "[Tilbagekaldte ultralydssystemer og dockingstationer](#)" på side 2.

Tabel 2: Desinfektionsapparat, der er kompatibelt med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (A-H)

Enhed	C11 C11e	C11 Støbt urethan ¹	C15 C15e	C15 Støbt urethan ²	C60 C60e	HFL38
Nanosonics Trophon EPR*	✓		✓		✓	✓

✓ - Godkendt til brug

1 - Varenummer: P01960-xx, P02645-02, P02645-03 eller P03361-10

2 - Varenummer: P00798-03

* Se brugermanualen for information og vejledning om desinficeringens effektivitet og korrekt klinisk brug.

Tabel 3: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (A-H)

Desinfektionsmiddel	C11 C11e	C11 Støbt urethan ¹	C15 C15e	C15 Støbt urethan ²	C60 C60e	D2	HFL38
Airkem A-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alkohol, ethanol							
Anios-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aniosym DD1 (5 %)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Anioxyde 1000						✓	
Asepti-HB							
Asepti-servietter II	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Bacoban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bacoban WB						✓	
Baxedin Pre-Op	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CaviWipes	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cidalkan	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cidalkan Lingettes	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cidex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cidex OPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cidex Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cleanisept-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clinell Universal-renseservietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clorox bakteriedræbende servietter	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Clorox-servietter				✓			

Table 3: Desinfectionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (A-H) (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C11 C11e	C11 Støbt urethan ¹	C15 C15e	C15 Støbt urethan ²	C60 C60e	D2	HFL38
Control III	✓	✓	✓	✓	✓		
Coverage bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Coverage Plus bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Coverage Spray							
DisOPA						✓	
Dispatch	✓	✓		✓			
Dispatch-servietter			✓		✓	✓	✓
Dynacide PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Echo Clean Lingettes	✓	✓	✓	✓	✓		✓
End-Bac II	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Endosporine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envirocide							
Gluco Chlor-servietter	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Hydrogenperoxid (3 %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Incidin Plus (1 %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Incidin Plus (3 %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Korsolex Extra	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MadaCide 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Medzyme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metricide OPA Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 3: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (A-H) (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C11 C11e	C11 Støbt urethan ¹	C15 C15e	C15 Støbt urethan ²	C60 C60e	D2	HFL38
MetriSponge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nu-Cidex						✓	
PerCept RTU-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rely+On PeraSafe						✓	
Sani-Cloth HB	✓	✓	✓	✓	✓		
Sani-Cloth Plus	✓	✓	✓	✓	✓		
Sani-Cloth-servietter med blegemiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sekusept	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Staphene	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Steranios (2 %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steranios 20 %						✓	
T-Spray			✓		✓		
T-Spray II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trigene Advance-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tristel Duo						✓	
Tristel Solo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tristel-servietter						✓	
Vådserviet-desinficering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virex 256							
Virex TB							

Tabel 3: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (A-H) (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C11 C11e	C11 Støbt urethan ¹	C15 C15e	C15 Støbt urethan ²	C60 C60e	D2	HFL38
Virox 5-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virufen						✓	
Wet Task-servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wex-Cide	✓	✓	✓	✓	✓		
Wipes Plus desinficerende servietter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - Godkendt til brug

1 - Varenummer: P01960-xx, P02645-02, P02645-03 eller P03361-10

2 - Varenummer: P00798-03

3 - Desinfektionsmidlerne er blevet testet af FUJIFILM SonoSite for desinfektionseffektivitet på FUJIFILM SonoSite-transducere.

Tilbagekaldte standardtransducere, I-Z

Du kan desinficere transduceren, scanningsoverfladen og ledningen ved brug af et anbefalet desinfektionsmiddel eller -apparat. Rengør transduceren inden desinficering for at fjerne eventuelle partikler eller legemsvæsker. Se "[Sådan rengøres en transducer](#)" på side 26.

Tabel 4: Desinfektionsapparat, der er kompatibelt med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (I-Z)

Enhed	L25 L25e	L38 L38e	L52 L52e Kun Vet	P10	P17
Trophon EPR*	✓	✓		✓	✓

✓ - Godkendt til brug

* Se brugermanualen for information og vejledning om desinficeringens effektivitet og korrekt klinisk brug.

Tabel 5: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (I-Z)

Desinfektionsmiddel	L25 L25e	L38 L38e	L52 L52e Kun Vet	P10	P17
Accel Intervention-servietter					
Airkem A-33	✓	✓	✓	✓	✓
Alkohol, ethanol					
Anios-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Aniosym DD1 (5 %)	✓	✓	✓	✓	✓
Anioxyde 1000			✓		
Asepti-HB					
Asepti-servietter II	✓	✓	✓	✓	✓
Bacoban	✓	✓	✓	✓	✓
Baxedin Pre-Op	✓	✓	✓	✓	✓
Carpe Diem TB-servietter					
Cavicide					
CaviWipes	✓	✓	✓	✓	✓
Cidalkan	✓	✓	✓	✓	✓
Cidalkan Lingettes	✓	✓	✓	✓	✓
Cidex	✓	✓	✓	✓	✓
Cidex OPA	✓	✓	✓	✓	✓
Cidex Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Cleanisept-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Clinell Universal-renseservietter	✓	✓		✓	✓

Tabel 5: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (I-Z) (fortsat)

Desinfektionsmiddel	L25 L25e	L38 L38e	L52 L52e Kun Vet	P10	P17
Clorox bakteriedræbende servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Clorox-servietter med hydrogenperoxid					
Control III	✓	✓	✓	✓	✓
Coverage bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓	✓	✓	✓
Coverage Plus bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓		✓	✓
Coverage Spray					
DisCide Ultra Disinfecting Towelettes					
Dispatch	✓				
Dispatch-servietter		✓	✓	✓	✓
Dynacide PA	✓	✓	✓	✓	✓
Echo Clean Lingettes	✓	✓	✓	✓	✓
End-Bac II	✓	✓	✓	✓	✓
Endosporine	✓	✓	✓	✓	✓
Envirocide					
Gluco Chlor-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrogenperoxid (3 %)	✓	✓	✓	✓	✓
Incidin Plus (1 %)	✓	✓	✓	✓	✓
Incidin Plus (3 %)	✓	✓	✓	✓	✓
Korsolex Extra	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 5: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite standardtransducere (I-Z) (fortsat)

Desinfektionsmiddel	L25 L25e	L38 L38e	L52 L52e Kun Vet	P10	P17
MadaCide 1	✓	✓	✓	✓	✓
Medzyme	✓	✓	✓	✓	✓
Metricide OPA Plus	✓	✓	✓	✓	✓
MetriSponge	✓	✓	✓	✓	✓
MetriZyme					
Mikrobac forte 2 %					
Mikrobac-servietter					
Oxivir TB-servietter					
PerCept RTU-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Protex-servietter					
Rely+On PeraSafe			✓		
Sani-Cloth AF					
Sani-Cloth AF3					
Sani-Cloth HB	✓	✓	✓	✓	✓
Sani-Cloth Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Sani-Cloth-servietter med blegemiddel	✓	✓	✓	✓	✓
Sekusept	✓	✓	✓	✓	✓
Simple Chlor					
Sporicidin					
Staphene	✓	✓	✓	✓	✓

Table 5: Disinfectants compatibility with recalled FUJIFILM SonoSite standard transducers (I-Z) (continued)

Disinfectant	L25 L25e	L38 L38e	L52 L52e Kun Vet	P10	P17
Steranios (2 %)	✓	✓	✓	✓	✓
Steranios (20 %)			✓		
Super Sani-Cloth					
T-Spray		✓	✓	✓	✓
T-Spray II	✓	✓	✓	✓	✓
Trigene Advance-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Tristel Solo	✓	✓	✓	✓	✓
Tristel-servietter			✓		
Vådserviet-desinficering	✓	✓	✓	✓	✓
Virex 256					
Virex II 256					
Virex TB					
Virox 5 RTU-servietter					
Virox 5-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Wet Task-servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Wex-Cide	✓	✓		✓	✓
Wipes Plus desinficerende servietter	✓	✓	✓	✓	✓
Wood Wyant Ultra-servietter					

✓ - Godkendt til brug

1 Desinfektionsmidlerne er blevet testet af FUJIFILM SonoSite for desinfektionseffektivitet på FUJIFILM SonoSite-transducere.

Tilbagekaldte specialtransducere

Du kan desinficere transduceren, scanningsoverfladen og ledningen ved brug af et anbefalet desinfektionsmiddel eller -apparat. Rengør transduceren inden desinficering for at fjerne eventuelle partikler eller legemsvæsker. Se "[Sådan rengøres en transducer](#)" på side 26.

De tilbagekaldte specialtransducere, som er angivet nedenfor, svarer til dem, som er angivet i tabellen "[Tilbagekaldte ultralydssystemer og dockingstationer](#)" på side 2.

Tabel 6: Desinfektionsapparat, der er kompatibelt med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite specialtransducere

Enhed	C8 C8e C8x	ICT	SLA	SLT
Trophon EPR*	✓	✓	✓	

✓ - Godkendt til brug

* Se brugermanualen for information og vejledning om desinficeringens effektivitet og korrekt klinisk brug.

Tabel 7: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite specialtransducere

Desinfektionsmiddel	C8 C8e C8x	ICT	SLA	SLT
Airkem A-33	✓	✓	✓	✓
Alkohol, ethanol				
Anios-servietter	✓	✓	✓	✓
Aniosym DD1 (5 %)	✓	✓	✓	✓
Anioxyde 1000				✓
Asepti-HB				
Asepti-servietter II	✓	✓	✓	✓
Bacoban	✓	✓	✓	✓
Baxedin Pre-Op	✓	✓	✓	✓

Tabel 7: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite specialtransducere (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C8 C8e C8x	ICT	SLA	SLT
CaviWipes	✓	✓	✓	✓
Cidalkan	✓	✓	✓	✓
Cidalkan Lingettes	✓	✓	✓	✓
Cidex	✓	✓	✓	✓
Cidex OPA	✓	✓	✓	✓
Cidex Plus	✓	✓	✓	✓
Cleanisept-serviet	✓	✓	✓	✓
Clinell Universal-renseservietter		✓	✓	
Clorox bakteriedræbende servietter	✓	✓	✓	✓
Control III	✓	✓	✓	✓
Coverage bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓	✓	✓
Coverage Plus bakteriedræbende overfladeservietter	✓	✓	✓	
Coverage Spray				
Dispatch-servietter	✓	✓	✓	✓
Dynacide PA	✓	✓	✓	✓
Echo Clean Lingettes		✓	✓	✓
End-Bac II	✓	✓	✓	✓
Endosporine	✓	✓	✓	✓
Envirocide				
Glucol Chlor-servietter	✓	✓	✓	✓

Tabel 7: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite specialtransducere (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C8 C8e C8x	ICT	SLA	SLT
Hydrogenperoxid (3 %)	✓	✓	✓	✓
Incidin Plus (1 %)	✓	✓	✓	✓
Incidin Plus (3 %)	✓	✓	✓	✓
Korsolex Extra	✓	✓	✓	✓
MadaCide 1		✓	✓	✓
Medzyme	✓	✓	✓	✓
Metricide OPA Plus	✓	✓	✓	✓
MetriSponge	✓	✓	✓	✓
PerCept RTU-servietter		✓	✓	✓
Rely+On PeraSafe				✓
Sani-Cloth HB	✓	✓	✓	✓
Sani-Cloth Plus	✓	✓	✓	✓
Sani-Cloth-servietter med blegemiddel	✓	✓	✓	✓
Sekusept	✓	✓	✓	✓
Staphene	✓	✓	✓	✓
Steranios (2 %)	✓	✓	✓	✓
Steranios (20 %)				✓
T-Spray		✓	✓	✓
T-Spray II	✓	✓	✓	✓
Trigene Advance-servietter	✓	✓	✓	✓
Tristel Duo	✓			

Tabel 7: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite specialtransducere (fortsat)

Desinfektionsmiddel	C8 C8e C8x	ICT	SLA	SLT
Tristel Solo	✓	✓	✓	✓
Tristel-servietter				✓
Vådserviet-desinficering	✓	✓	✓	✓
Virex 256				
Virex TB				
Virox 5-servietter	✓	✓	✓	✓
Wet Task-servietter	✓	✓	✓	✓
Wex-Cide	✓	✓	✓	
Wipes Plus desinficerende servietter		✓	✓	✓

✓ - Godkendt til brug

Tilbagekaldt tilbehør

Du kan desinficere tilbehørets udvendige overflader ved brug af et anbefalet desinfektionsmiddel.

Det tilbagekaldte tilbehør, som er angivet nedenfor, svarer til dem, som er angivet i tabellen "Tilbagekaldte ultralydssystemer og dockingstationer" på side 2.

Table 8: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite tilbehør

Desinfektionsmiddel	H-Universal-konsol	MDS Lite, MDS Lite II	Basiskonsol, Fodkontakt, iLook-konsol, MDSe, MDSm, S Series-konsol, ScanPack, SiteCharge, SiteStand	Systembatteri	iLook-dockingstation	PowerPack	PowerPark	EKG-kabel	Fjernbetjening	Strømforsyning	Triple Transducer Connect
Airkem A-33	✓					✓	✓			✓	✓
Alkohol, ethanol											
Alkohol, Isopropyl (100 %)	✓										✓
Alkohol, Isopropyl (70 %)		✓	✓	✓	✓			✓			
Anios-servietter	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Aniosym DD1 (5 %)	✓					✓	✓			✓	✓
Anioxyde 1000	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Asepti-HB	✓					✓	✓			✓	✓
Asepti-servietter II	✓					✓	✓			✓	✓
Asepti-Steryl						✓				✓	✓
Baxedin Pre-Op						✓					
CaviWipes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cidalkan										✓	✓
Cidalkan-servietter											

Tabel 8: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite tilbehør (fortsat)

Desinfektionsmiddel	H-Universal-konsol	MDS Lite, MDS Lite II	Basiskonsol, Fodkontakt, iLook-konsol, MDS, MDSm, S Series-konsol, ScanPack, SiteCharge, SiteStand	Systembatteri	iLook-dockingstation	PowerPack	PowerPark	EKG-kabel	Fjernbetjening	Strømforsyning	Triple Transducer Connect
Cidex	✓					✓	✓			✓	✓
Cidex OPA	✓					✓	✓			✓	✓
Cidex Plus	✓					✓	✓			✓	✓
Clinell Universal-renseservietter	✓					✓				✓	✓
Clorox bakteriedræbende serviet						✓				✓	
Control III	✓					✓	✓			✓	✓
Coverage bakteriedræbende overfladeservietter	✓									✓	✓
Coverage Plus bakteriedræbende overfladeservietter										✓	✓
Coverage Plus-servietter									✓		
Coverage Spray	✓					✓				✓	✓
Coverage-servietter						✓			✓		
DisCide Ultra Disinfecting Towelettes						✓				✓	✓
Dynacide PA	✓					✓	✓			✓	✓

Tabel 8: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite tilbehør (fortsat)

Desinfektionsmiddel	H-Universal-konsol	MDS Lite, MDS Lite II	Basiskonsol, Fodkontakt, iLook-konsol, MDS _e , MDS _m , S Series-konsol, ScanPack, SiteCharge, SiteStand	Systembatteri	iLook-dockingstation	PowerPack	PowerPark	EKG-kabel	Fjernbetjening	Strømforsyning	Triple Transducer Connect
Echo Clean Lingettes						✓	✓			✓	✓
End-Bac II						✓				✓	✓
Endosporine	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Envirocide	✓					✓	✓			✓	✓
Gluco Chlor-servietter						✓				✓	
Hydrogenperoxid (3 %)	✓					✓	✓		✓ ¹	✓	✓
Incidin Plus (1 %)	✓					✓	✓			✓	✓
Incidin Plus (3 %)	✓					✓	✓			✓	
MadaCide 1						✓				✓	
Medzyme	✓					✓	✓			✓	
Metricide OPA Plus	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Mikrobac Forte 2 %											
Mikrobac-servietter											
Nu-Cidex							✓				✓
Oxivir TB-servietter											
PerCept RTU-servietter	✓					✓	✓		✓	✓	
Rely+On PeraSafe	✓					✓	✓		✓	✓	✓

Tabel 8: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite tilbehør (fortsat)

Desinfektionsmiddel	H-Universal-konsol	MDS Lite, MDS Lite II	Basiskonsol, Fodkontakt, iLook-konsol, MDS _e , MDS _m , S Series-konsol, ScanPack, SiteCharge, SiteStand	Systembatteri	iLook-dockingstation	PowerPack	PowerPark	EKG-kabel	Fjernbetjening	Strømforsyning	Triple Transducer Connect
Sani-Cloth AF											✓
Sani-Cloth HB						✓			✓	✓	
Sani-Cloth Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sani-Cloth-servietter med blegemiddel						✓				✓	
Simple Chlor											
Sporicidin	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Staphene						✓				✓	
Steranios 2 %	✓					✓	✓			✓	✓
Steranios 20 %	✓					✓	✓			✓	✓
Super Sani-Cloth			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
T-Spray	✓					✓				✓	
T-Spray II	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Trigene Advance-servietter										✓	
Tristel Solo	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Tristel-servietter										✓	
Virex 256	✓					✓	✓			✓	

Tabel 8: Desinfektionsmidlers kompatibilitet med tilbagekaldte FUJIFILM SonoSite tilbehør (fortsat)

Desinfektionsmiddel	H-Universal-konsol	MDS Lite, MDS Lite II	Basiskonsol, Fodkontakt, iLook-konsol, MDS, MDSm, S Series-konsol, ScanPack, SiteCharge, SiteStand	Systembatteri	iLook-dockingstation	PowerPack	PowerPark	EKG-kabel	Fjernbetjening	Strømforsyning	Triple Transducer Connect
Virex II 256											
Virex TB	✓					✓				✓	
Virox 5-servietter	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Wet Task-servietter	✓					✓				✓	
Wex-Cide	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Wipes Plus desinficerende servietter	✓					✓				✓	✓
Wood Wyant Ultra-servietter	✓										✓

✓ - Godkendt til brug

1 Må ikke anvendes på mikrofonklemmen. (Mikrofonklemmen kan tages af mikrofonen).

Rengøring af transducere

Rengør transduceren inden desinficering for at fjerne eventuelle partikler eller legemsvæsker.

Sådan rengøres en transducer

- 1 Kobl transduceren fra ultralydssystemet.
- 2 Fjern eventuel transducerskede.
- 3 Rengør overfladen med en blød klud, der er let fugtet i en mild sæbeopløsning eller et foreneligt rengøringsmiddel. Kom opløsningen på kluden og ikke direkte på overfladen.
- 4 Skyl efter med vand, eller aftør med en klud fugtet med vand, og tør derefter af med en tør klud.

Producent

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tlf.: +1-888-482-9449 eller
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

Autoriseret repræsentant i EU

Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
Holland

Australsk sponsor

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australien

Forsigtig

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges af læger eller på ordination af en læge.

iLook, MicroMaxx, TITAN, SonoSite og SonoSite-logoet er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende FUJIFILM SonoSite, Inc. i forskellige jurisdiktioner.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Varenummer: P15342-05

Publikationsdato: Januar 2016

Copyright © 2016 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

P15342-05

