

Guía de referencia rápida

Encendido del sistema

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del sistema.

Iniciar un estudio

Nuevo paciente

- 1 Pulse **Entrar Información del paciente** en la pantalla de inicio o **+ Nuevo paciente** en el panel táctil.
- 2 Introduzca información sobre el paciente.
- 3 Pulse **Explorar** para comenzar la exploración. Todos los datos que se guarden durante el estudio se vinculan al paciente.

Tipos de examen

- 1 Seleccione el botón de transductor y de examen.
- 2 Seleccione un transductor y tipo de examen.
- 3 Pulse dos veces sobre el tipo de examen o pulse **Explorar** para comenzar la exploración.

Escaneado

- 2D es el modo predeterminado. Pulse **2D** para volver al modo predeterminado.
- Pulse **M** para explorar en el modo M.
- Pulse **C** para explorar en Doppler en color.
- Pulse **D** para explorar en Doppler.

Modo M

- 1 Use la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor para colocar la línea M en la imagen 2D.
- 2 Para visualizar tanto la línea M como el trazo, pulse **↻** (Actualizar) o pulse **M** de nuevo.
- 3 Para cambiar entre la imagen y el trazo, toque la imagen o el trazo en la pantalla táctil del monitor bien pulse el botón **↻** (Actualizar).


Doppler en color

- 1 Emplee el control **Tipo de color** del panel táctil para alternar entre la velocidad del color (CVD) y la intensidad del color (CPD), o entre la CVD y la variación del color (Var), en función del tipo de examen. Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** para encontrar el control.
- 2 Coloque el cuadro de color, deslizando el dedo sobre la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor.
- 3 Para cambiar el tamaño del cuadro de color, toque su círculo en la pantalla táctil del monitor o pulse **☞** (Seleccionar) y deslice el

dedo sobre la almohadilla táctil.

Doppler

- 1 Emplee el control del **Modo Doppler** del panel táctil para alternar entre la exploración Doppler TDI, PW y CW (las opciones CW y TDI están disponibles solamente para el examen cardíaco). Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** para encontrar el control.
- 2 Use la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor para colocar la línea D y la ventana en la imagen 2D.
- 3 Para visualizar el trazo espectral, pulse **↻** (Actualizar) o pulse **D** de nuevo.
- 4 Para cambiar entre la imagen y el trazo, toque la imagen o el trazo en la pantalla táctil del monitor o pulse el botón **↻** (Actualizar).

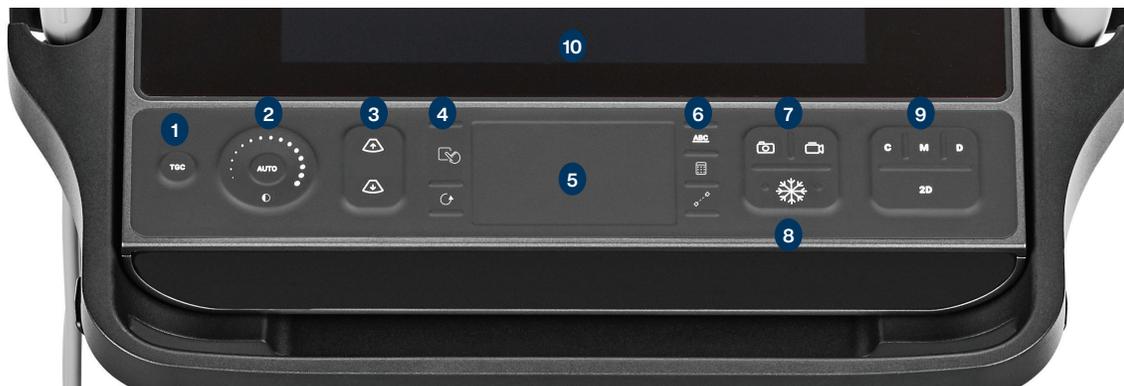

Anterior



Reverso

Clave:

- 1 Compensación de ganancia de tiempo
- 2 Control de ganancia
- 3 Profundidad
- 4 Seleccionar y actualizar
- 5 Almohadilla táctil
- 6 Etiquetas, cálculos, calibradores
- 7 Botones de guardado
- 8 Congelar
- 9 Modos
- 10 Panel táctil con controles táctiles
- 11 Puertos USB, HDMI, Ethernet
- 12 Botón de encendido

Guía de referencia rápida

Gan.

Ajuste la ganancia mediante una de las siguientes acciones:

- Arrastre el dedo por la rueda de ganancia.
- Pulse **TGC** (Compensación de ganancia de tiempo) y ajuste los controles deslizantes en el panel táctil.
- Toque el icono de ganancia  y ajuste el control deslizante en la pantalla táctil del monitor.
- Toque **Auto** en la pantalla táctil del monitor o pulse **AUTO** para ajustar la ganancia automáticamente.

Profundidad

- Use el control deslizante de la pantalla táctil del monitor o pulse los botones de profundidad  y .

Congelación, descongelación y modo Cine

- 1 Pulse el botón . La pantalla CINE aparece en la esquina inferior izquierda del monitor.
- 2 Para desplazarse a través de los fotogramas del modo Cine, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre el dedo por la almohadilla táctil en sentido horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse el lado derecho o izquierdo de la almohadilla táctil.
 - Deslice el dedo por la rueda de ganancia hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse con firmeza el lado derecho o izquierdo de la rueda.
- 3 Para descongelar, pulse el botón  de nuevo.

Zoom

Zoom en directo

- 1 Pulse **Zoom** en el panel táctil.
- 2 Coloque el cuadro de zoom, deslizando el dedo sobre la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor.
- 3 Para cambiar de tamaño el cuadro de zoom, toque su círculo en la pantalla táctil del monitor o pulse  (Seleccionar) y deslice el dedo sobre la almohadilla táctil.
- 4 Pulse el control de nuevo para utilizar el zoom.

Zoom congelado

- 1 Pulse **Zoom** en el panel táctil.
- 2 Pulse arriba o abajo en el control para ajustar el aumento.
- 3 Utilice la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor para mover la imagen.

Mediciones y cálculos

Mediciones

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón  (Calibrador).
- 2 Use la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor para colocar los calibradores predeterminados o seleccione una medición diferente en el panel táctil.
- 3 Toque un calibrador de la pantalla táctil del monitor o pulse  (Seleccionar) para alternar entre los calibradores.

Cálculos

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón  (Cálculos) para visualizar el menú de paquetes de análisis.
- 2 Utilice el panel táctil para seleccionar una medición.
- 3 Use la almohadilla táctil o la pantalla táctil del monitor para colocar los calibradores.
- 4 Toque un calibrador de la pantalla táctil del monitor o pulse  (Seleccionar) para alternar entre los calibradores.

Etiquetas

- 1 Pulse el botón **ABC** para mostrar la página de etiquetado.
- 2 Pulse **Texto**, **Picto** o **Flecha** para añadir texto, pictogramas o flechas a la imagen.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar la etiqueta.

Guardar y revisar

- Pulse el botón  para guardar una imagen y las mediciones y cálculos actuales. Los cálculos y las mediciones asociadas también se guardan en el informe del paciente.
- Pulse el botón  para guardar un clip.
- Pulse sobre las imágenes en miniatura para acceder a la pantalla de revisión o pulse **Lista pac.** para ver otro estudio. (Puede encontrar esta opción en el panel táctil principal, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú).

Finalizar y exportar

- 1 Pulse **FIN ESTU** para finalizar el estudio. Los estudios que están abiertos no se pueden exportar.
- 2 Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en un puerto USB del ecógrafo o de la base.
- 3 Pulse **Lista pac.** Seleccione uno o varios estudios para exportarlos.
- 4 Pulse **Enviar a** y luego pulse **USB**.
- 5 Seleccione la unidad USB en la lista y elija si va a incluir información del paciente.
- 6 Pulse **Exportar**.

Ayuda y aprendizaje

- Pulse  para acceder a la ayuda integrada.
- Acceda a la función **Aprend** para obtener vídeos de formación y de procedimientos.

P28685-01



CE
2797

FUJIFILM SONOSITE
Value from Innovation

FUJIFILM Sonosite, Inc.
Oficina central mundial
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
Tel.: +1 (425) 951 1200 o +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Oficinas de Sonosite en todo el mundo
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nueva Zelanda ..0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brasil+55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canadá Inc.+1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd+86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Alemania+49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-Estados Unidos+1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd+91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Ibérica SL-España+34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japón+81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Corea Ltd+65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-Reino Unido+44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-Francia+33 182 880 702

SONOSITE, el logotipo de SONOSITE y "Any patient. Anywhere. Anytime. (Cualquier paciente. Cualquier lugar. Cualquier momento.)" son marcas comerciales y registradas propiedad de FUJIFILM Sonosite, Inc. en diversas jurisdicciones. FUJIFILM es una marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation en diversas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright © 2021 FUJIFILM Sonosite, Inc. Todos los derechos reservados.

11/2021