

## Sonosite MT Guía rápida

### Encendido del sistema

Pulse el botón de encendido situado en la parte delantera del sistema.

### Iniciar un estudio

#### Nuevo paciente

1. Pulse **Entrar** en la pantalla de inicio o **+ Nuevo paciente** en el panel táctil.
2. Introduzca información sobre el paciente.
3. Pulse **Explorar** para comenzar la exploración.

Todos los datos que se guarden durante el estudio se vinculan al paciente.

#### Tipos de examen

1. Seleccione el botón de transductor y de examen.
2. Seleccione el tipo de transductor y de examen.
3. Pulse dos veces sobre el tipo de examen o pulse **Explorar** para comenzar la exploración.

### Escaneo

- 2D es el modo predeterminado. Seleccione **2D** para volver al modo predeterminado.
- Pulse **M** para explorar en Modo M.
- Seleccione **C** para explorar en Doppler en color.
- Toque **D** para explorar en Doppler.

#### Modo M

1. Coloque la línea M en la imagen 2D en la pantalla táctil del monitor.
2. Para ver tanto la imagen de la línea M como el trazo del Modo M, pulse **M** de nuevo.
3. Toque la imagen o el trazo para cambiar los controles entre ellos.

#### Doppler en color

1. Use el control de **Tipo de color** para alternar entre Doppler de velocidad en color (CVD) y Doppler de potencia en color (CPD), o entre CVD y la varianza en color (Var), en función del tipo de examen. Es posible que tenga que pulsar **+ Más**


**controles** en el panel táctil para encontrar el control.

2. Coloque el cuadro de color arrastrándolo por la pantalla táctil del monitor.
3. Pulse y arrastre el círculo que aparece en la esquina para controlar el tamaño del cuadro de color.

#### Doppler

1. Utilice el control **Modo Doppler** para alternar entre la exploración Doppler TDI, PW y CW (las opciones CW y TDI están disponibles solamente para el examen cardíaco). Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** para encontrar el control.
2. Coloque la línea D y la ventana en la imagen 2D con la pantalla táctil del monitor.
3. Para visualizar el trazo espectral, vuelva a pulsar **D**.
4. Toque la imagen o el trazo para cambiar los controles entre ellos.

### Monitor clínico

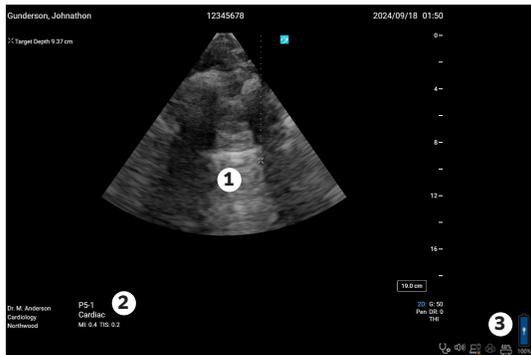

### Panel táctil



### Parte delantera y trasera del sistema



### Legenda

1. Monitor clínico y pantalla táctil
2. Tipo de examen
3. Nivel de batería y conexiones
4. Estudio, paciente e informes
5. Menú de tipo de examen de transductor
6. Más controles
7. Modos
8. Etiquetas, cálculos, calibradores
9. Controles de ganancia y cine
10. Botones de guardado
11. Botón de encendido
12. Puertos HDMI, ECG, Ethernet y de alimentación

## Sonosite MT Guía rápida

### Ganancia

Ajuste la ganancia mediante una de las siguientes acciones:

- Ajuste el control deslizante en el panel táctil.
- Pulse **AUTO** en el panel táctil para ajustar de forma automática la ganancia.

### Profundidad

- Use el control deslizante del panel táctil o pulse los botones de profundidad  $\uparrow$  y  $\downarrow$ .

### Congelación, descongelación y Modo cine

1. Pulse el botón  $\star$ . La pantalla CINE aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil del monitor.
2. Para desplazarse por los fotogramas del Modo cine, arrastre el dedo horizontalmente por la pantalla táctil del monitor hacia la derecha o hacia la izquierda para avanzar o retroceder. Para moverse por los fotogramas, pulse  $\blacktriangleright$  o  $\blacktriangleleft$ .
3. Para descongelar, pulse el botón  $\star$  de nuevo.

### Zoom

#### Zoom en directo

1. Pulse **Zoom** en el panel táctil. Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** en el panel táctil para encontrar el control.
2. Coloque el cuadro de zoom arrastrándolo por la pantalla táctil del monitor.
3. Pulse y arrastre el círculo que aparece en la esquina para controlar el tamaño del cuadro de zoom.
4. Pulse el control de nuevo para utilizar el zoom.

### Zoom congelado

1. En una imagen congelada, pulse **Zoom** en el panel táctil. Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** en el panel táctil para encontrar el control.
2. Pulse arriba o abajo en el control para ajustar el aumento.
3. Mueva la imagen en la pantalla táctil del monitor.

## Mediciones y cálculos

### Mediciones

1. En una imagen en directo o congelada, pulse el botón  $+ - +$  Calibrador.
2. Coloque los calibradores predeterminados en la pantalla táctil del monitor o seleccione una medición diferente en el panel táctil.
3. Toque un calibrador en la pantalla táctil del monitor para alternar entre los calibradores.

### Cálculos

1. En una imagen en directo o congelada, pulse el botón  $\square$  Cálculos para visualizar los paquetes de análisis.
2. Utilice el panel táctil para seleccionar una medición.
3. Coloque los calibradores en la pantalla táctil del monitor.
4. Toque un calibrador en la pantalla táctil del monitor para alternar entre los calibradores.

### Etiquetas

1. Pulse la **ABC** para visualizar la página de etiquetado.
2. Pulse **Texto**, **Picto**, o **Flecha** para añadir texto, pictogramas o flechas en la imagen.

3. Coloque la etiqueta en la pantalla táctil del monitor.

### Guardar y revisar

- Pulse el botón  $\square$  para guardar una imagen y las mediciones y cálculos actuales. Los cálculos y las mediciones asociadas también se guardan en el informe del paciente.
- Pulse el botón  $\square$  para guardar un clip.
- Pulse sobre las imágenes en miniatura para acceder a la pantalla de revisión o pulse **Lista pac.** para ver otro estudio. (Puede encontrar esta opción en el panel táctil principal, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú  $\equiv$ ).

### Finalizar y exportar

1. Pulse **FIN ESTU** para finalizar el estudio. Los estudios que están abiertos no se pueden exportar.
2. Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en un puerto USB del sistema o soporte.
3. Toque **Lista pac.** Seleccione uno o varios estudios para exportarlos.
4. Pulse **Enviar a** y luego pulse **USB**.
5. Seleccione la unidad USB en la lista y elija si va a incluir información del paciente.
6. Toque **Exportar**.

### Ayuda y aprendizaje

- Pulse  $\textcircled{i}$  para acceder a la ayuda integrada o toque **Ayuda** en el menú del sistema  $\equiv$ .
- Acceda a la función Aprender para obtener vídeos de formación y de procedimientos.

P25661-01



### FUJIFILM Sonosite, Inc.

Oficina central mundial  
21919 30th Drive SE  
Bothell, WA 98021-3904  
Tel.: +1 (425) 951 1200  
o +1 (877) 657 8050  
Fax: +1 (425) 951 6800  
[www.sonosite.com](http://www.sonosite.com)

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia. . . . . +300 663 516  
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nueva Zelanda . . . . . +0800 888 204  
FUJIFILM Sonosite Brasil . . . . . +55 11 5574 7747  
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. . . . . +1 888 554 5502  
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd . . . . . +86 21 5010 6000  
FUJIFILM Sonosite GmbH: Alemania . . . . . +49 69 80 88 40 30  
FUJIFILM Sonosite, Inc.: Estados Unidos . . . . . +1 425 951 1200

### Oficinas de Sonosite en todo el mundo

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. . . . . +91 124 288 1100  
FUJIFILM Sonosite Ibérica SL: España. . . . . +34 91 123 84 51  
FUJIFILM Medical Co., Ltd.: Japón . . . . . +81 3 0418 7190  
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd. . . . . +65 6380 5589  
FUJIFILM Sonosite Ltd: Reino Unido . . . . . +44 1462 341 151  
FUJIFILM Sonosite SARL: Francia. . . . . +33 182 880 702