

SONOSITE PX

Guía de referencia rápida

Encendido del sistema

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del sistema.

Iniciar un estudio Nuevo paciente

- 1 Pulse Entrar Información del paciente en la pantalla de inicio o + Nuevo paciente en el panel táctil.
- 2 Introduzca información sobre el paciente.
- 3 Pulse Explorar para comenzar la exploración.

Todos los datos que se guarden durante el estudio se vinculan al paciente.

Tipos de examen

- Seleccione el botón de transductor y de examen.
- 2 Seleccione el tipo de transductor y de examen.
- 3 Pulse Explorar para comenzar la exploración.

Exploración

• 2D es el modo predeterminado. Pulse 2D para volver al modo predeterminado.

- · Pulse M para explorar en el modo M.
- · Pulse C para explorar en Doppler en color
- · Pulse D para explorar en Doppler.

Modo M

- 1 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea M en la imagen 2D.
- 2 Para visualizar tanto la línea M como el trazo, pulse (Actualizar) o pulse M de
- 3 Pulse el botón (*) (Actualizar) para alternar el control entre la imagen y el trazo.

Doppler en color

1 Emplee el control Tipo de color del panel táctil para alternar entre la velocidad del color (CVD) y la intensidad del color (CPD), o entre la CVD y la variación del color (Var), en función del tipo de examen. Es posible que tenga que pulsar + Más controles para encontrar el control.

- 2 Arrastre el dedo por la almohadilla táctil para situar el cuadro de color.
- 3 Pulse (Seleccionar) para controlar el tamaño del cuadro de color y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.

Doppler

- 1 Emplee el control del Modo Doppler del panel táctil para alternar entre la exploración Doppler TDI, PW y CW (las opciones CW y TDI están disponibles solamente para el examen cardíaco). Es posible que tenga que pulsar + Más controles para encontrar el control.
- 2 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea D y la ventana en la imagen 2D.
- 3 Para visualizar el trazo espectral, pulse (Actualizar) o pulse D de nuevo.
- 4 Pulse el botón (Actualizar) para alternar el control entre la imagen y el trazo.





Leyenda:

- Compensación de ganancia de tiempo
- 2 Ganancia
- 3 Profundidad
- 4 Seleccionar y Actualizar
- 5 Almohadilla táctil
- 6 Etiquetas, cálculos y calibradores
- 7 Botones de guardado
- 8 Congelación
- 9 Modos
- 10 Panel táctil con controles táctiles
- 11 Puertos USB
- 12 Botón de encendido/apagado

Guía de referencia rápida

Ganancia

Ajuste la ganancia mediante una de las siguientes acciones:

- · Arrastre el dedo por la rueda de ganancia.
- Pulse TGC (Compensación de ganancia de tiempo) y ajuste los controles deslizantes en el panel táctil.
- Pulse AUTO para ajustar de forma automática la ganancia.

Profundidad

Pulse los botones de profundidad 🕥 y

Congelación, descongelación y modo

- 1 Pulse el botón **. La pantalla CINE aparece en la esquina inferior izquierda del monitor.
- 2 Para desplazarse a través de los fotogramas del modo Cine, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre el dedo por la almohadilla táctil en sentido horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse el lado derecho o izquierdo de la almohadilla táctil.
 - Deslice el dedo por la rueda de ganancia hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse con firmeza el lado derecho o izquierdo de la rueda.
- 3 Para descongelar, pulse el botón 💥 de nuevo.

Zoom

Zoom en directo

1 Pulse Zoom en el panel táctil. 2 Arrastre el dedo por la almohadilla táctil

- para situar el cuadro de zoom.
- 3 Pulse (Seleccionar) para controlar el tamaño del cuadro de zoom y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.
- 4 Pulse el control de nuevo para utilizar el zoom.

Zoom congelado

- 1 Pulse Zoom en el panel táctil.
- 2 Pulse arriba o abajo en el control para ajustar el aumento.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para mover la imagen.

Mediciones y cálculos Mediciones

- 1 En una imagen en directo o congelada, image, pulse el botón (Calibrador).
- 2 Utilice la almohadilla tăctil para situar los calibradores predeterminados o seleccione una medición diferente en el panel táctil.
- 3 Pulse (Seleccionar) to para alternar entre los calibradores.

Cálculos

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón ((CALCS)) para visualizar el menú de paquetes de análisis.
- 2 UUtilice el panel táctil para seleccionar una medición.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar el calibrador.
- 4 Pulse to para alternar entre los calibradores.

Etiquetas

- 1 Pulse el botón <u>ABC</u> para visualizar la página de etiquetado.
- 2 Pulse Texto, Picto, o Flecha para añadir texto, pictogramas o flechas en la imagen.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar la etiqueta.

P27917-02

Guardar y revisar

- Pulse el botón o para guardar una imagen y las mediciones y cálculos actuales. Los cálculos y las mediciones asociadas también se guardan en el informe del paciente.
- Pulse el botón para guardar un clip.
- Pulse sobre las imágenes en miniatura para acceder a la pantalla de revisión o pulse Lista pac. para ver otro estudio.
 (Puede encontrar esta opción en el panel táctil principal, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú.)

Finalizar y exportar

- 1 Pulse FIN ESTU para finalizar el estudio. Los estudios que están abiertos no se pueden exportar.
- 2 Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en un puerto USB del sistema o soporte.
- 3 Pulse Lista pac. Seleccione un estudio o varios estudios para exportar.
- 4 Pulse Enviar a y luego pulse USB.
- 5 Seleccione la unidad USB en la lista y elija si va a incluir información del paciente.
- 6 Pulse Exportar.

Ayuda y aprendizaje

- Pulse (i) para acceder a la ayuda integrada y a la guía de usuario del sistema.
- Acceda a la función Aprend para obtener vídeos de formación y de procedimientos.

FUJIFILM SONOSITE

FUJIFILM Sonosite, Inc.

Oficina central mundial 21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021–3904 Tel: +1 (425) 951 1200 or +1 (877) 657 8050 Fax: +1 (425) 951 6800 www.sonosite.com

Oficinas de Sonosite en todo el mundo

Any patient. Anywhere. Anytime.

	Sonosite, IncEstados Unidos			
FUJIFILM	Sonosite India Pvt Ltd	+91 124	288	1100
FUJIFILM	Sonosite Ibérica SL-España	+34 91	1238	4 51
FUJIFILM	Medical Co., LtdJapón	. +8130)418	7190
FUJIFILM	Sonosite Korea Ltd	. +65 6	380 5	5589
FUJIFILM	Sonosite Ltd-Reino Unido	+44 146	2 34	1 151
FUJIFII M	Sonosite SARI -Francia	+33 182	880	702