

Guía de referencia rápida

Encendido del sistema

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del sistema.

Iniciar un estudio Nuevo paciente

- 1 Pulse Enter Patient Information (Introducir información del paciente) en la pantalla de inicio o + New Patient (Nuevo paciente) en el panel táctil.
- 2 Introduzca información sobre el paciente.
- 3 Pulse Scan (Explorar) para comenzar la exploración.

Todos los datos que se guarden durante el estudio se vinculan al paciente.

Tipos de examen

- 1 Seleccione el botón de transductor y de examen.
- 2 Seleccione un transductor y tipo de examen.
- 3 Pulse dos veces sobre el tipo de examen o pulse Scan (Explorar) para comenzar la exploración.

Escaneo

- 2D es el modo predeterminado. Pulse 2D para volver al modo predeterminado.

- Pulse M para explorar en el modo M.
- Pulse C para explorar en Doppler en color.
- Pulse D para explorar en Doppler.

Modo M

- 1 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea M en la imagen 2D.
- 2 Para visualizar tanto la línea M como el trazo, pulse UPDATE (Actualizar) /  o pulse M de nuevo.
- 3 Pulse el botón UPDATE (Actualizar)  para alternar el control entre la imagen y el trazo.

Doppler en color

- 1 Emplee el control Color Type (Tipo de color) del panel táctil para alternar entre la velocidad del color (CVD) y la intensidad del color (CPD), o entre la CVD y la variación del color (Var), en función del tipo de examen. Es posible que tenga que pulsar + More Controls (Más controles) en el panel táctil para encontrar el control.

- 2 Arrastre el dedo por la almohadilla táctil para situar el cuadro de color.
- 3 Pulse SELECT (Seleccionar) /  para controlar el tamaño del cuadro de color y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.

Doppler

- 1 Emplee el control del Doppler Mode (Modo Doppler) del panel táctil para alternar entre la exploración Doppler TDI, PW y CW (las opciones CW y TDI están disponibles solamente para el examen cardíaco). Es posible que tenga que pulsar + More Controls (Más controles) para encontrar el control.
- 2 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea D y la ventana en la imagen 2D.
- 3 Para visualizar el trazo espectral, pulse UPDATE (actualizar) /  o pulse D de nuevo.
- 4 Pulse el botón UPDATE (Actualizar) /  para alternar el control entre la imagen y el trazo.



Clave:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Compensación de ganancia de tiempo | 9 Modos |
| 2 Control de ganancia | 10 Panel táctil con controles táctiles |
| 3 Profundidad | 11 Salida de Vídeo |
| 4 Seleccionar y actualizar | 12 Ethernet |
| 5 Almohadilla táctil | 13 Puertos USB |
| 6 Etiquetas, cálculos, calibradores | 14 Botón de alimentación |
| 7 Guardar botones | 15 Puerto ECG |
| 8 Congelar | |

Guía de referencia rápida

Ganancia

Ajuste la ganancia mediante una de las siguientes acciones:

- Arrastre el dedo por la rueda de ganancia.
- Pulse TGC (Compensación de ganancia de tiempo) y ajuste los controles deslizantes en el panel táctil.
- Pulse AUTO (Automático) para ajustar de forma automática la ganancia.

Profundidad

- Pulse los botones de profundidad  y .

Congelación, descongelación y modo Cine

- 1 Pulse el botón . La pantalla CINE aparece en la esquina inferior izquierda del monitor.
- 2 Para desplazarse a través de los fotogramas del modo Cine, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre el dedo por el ratón digital en sentido horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse el lado derecho o izquierdo de la almohadilla táctil.
 - Deslice el dedo por la rueda de ganancia hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse con firmeza el lado derecho o izquierdo de la rueda.
- 3 Para descongelar, pulse el botón  de nuevo.

Zoom

Zoom en directo

- 1 Pulse Zoom en el panel táctil.
- 2 Coloque el cuadro de zoom arrastrando el dedo por la almohadilla táctil.

- 3 Pulse SELECT (seleccionar)/  para controlar el tamaño del cuadro de zoom y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.
- 4 Pulse el control de nuevo para utilizar el zoom.

Zoom congelado

- 1 Pulse Zoom en el panel táctil.
- 2 Pulse arriba o abajo en el control para ajustar el aumento.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para mover la imagen.

Mediciones y cálculos

Mediciones

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón CALIPER (calibrador) / .
- 2 Utilice la almohadilla táctil para situar los calibradores predeterminados o seleccione una medición diferente en el panel táctil.
- 3 Pulse SELECT (Seleccionar)/  para alternar entre los calibradores.

Cálculos

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón CALCS (Cálculos)/  para visualizar el menú de paquetes de análisis.
- 2 Utilice el panel táctil para seleccionar una medición.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar el calibrador.
- 4 Pulse SELECT (Seleccionar)/  para alternar entre los calibradores.

Etiquetas

- 1 Pulse el botón **ABC** para mostrar la página de etiquetado.
- 2 Pulse Text (Texto), Picto (Pictograma) o Arrow (Flecha) para añadir texto, pictogramas o flechas a la imagen.

- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar la etiqueta.

Guardar y revisar

- Pulse el botón  para guardar una imagen y las mediciones y cálculos actuales. Los cálculos y las mediciones asociadas también se guardan en el informe del paciente.
- Pulse el botón  para guardar un clip.
- Pulse sobre las imágenes en miniatura para acceder a la pantalla de revisión o pulse Lista pac. para ver otro estudio. (Puede encontrar esta opción en el panel táctil principal, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú).

Finalizar y exportar

- 1 Pulse FIN ESTU para finalizar el estudio. Los estudios que están abiertos no se pueden exportar.
- 2 Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en un puerto USB del ecógrafo o de la base.
- 3 Pulse Lista pac. Seleccione uno o varios estudios para exportarlos.
- 4 Pulse Enviar a y luego pulse USB.
- 5 Seleccione la unidad USB en la lista y elija si va a incluir información del paciente.
- 6 Pulse Exportar.

Ayuda y aprendizaje

- Pulse  para acceder a la ayuda integrada.
- Acceda a la función Aprender para obtener vídeos de formación y de procedimientos.

P31475-01



CE
2797

FUJIFILM SONOSITE

Cualquier paciente. Cualquier lugar. Cualquier momento.

FUJIFILM Sonosite, Inc.

Oficina central mundial
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
Tel.: +1 (425) 951 1200 o +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Oficinas de Sonosite en todo el mundo

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nueva Zelanda 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brasil +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canadá Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Alemania +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-Estados Unidos +1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Ibérica SL-España +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japón +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Corea Ltd +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-Reino Unido +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-Francia +33 182 880 702

SONOSITE, el logotipo de SONOSITE y "Cualquier paciente. Cualquier lugar. Cualquier momento." son marcas comerciales y registradas propiedad de FUJIFILM Sonosite, Inc. en diversas jurisdicciones. FUJIFILM es una marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation en diversas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright © 2023 FUJIFILM Sonosite, Inc. Todos los derechos reservados.

02/2023