

FUJIFILM

SonoSite iViz

Mobilität.
Klarheit.
Konnektivität.



SonoSite iViz

Hersteller

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021 USA

Tel.: +1-888-482-9449 oder

+1-425-951-1200

Fax: +1-425-951-1201

FUJIFILM

SONOSITE und IMZ sind Marken oder eingetragene Marken von FUJIFILM SonoSite, Inc. in verschiedenen Rechtsprechungen. FUJIFILM ist ein Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation in verschiedenen Rechtsprechungen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Bevollmächtigter Vertreter in der EG

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140

1114 AB Amsterdam,

Niederlande

Sponsor für Australien

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road

BROOKVALE,

NSW, 2100 Australien



Für wichtige
Sicherheitsinformationen das
iViz-Benutzerhandbuch lesen.

CE
2797


P20021-04



FUJIFILM


SonoSite iViz

Kurzan-
leitung

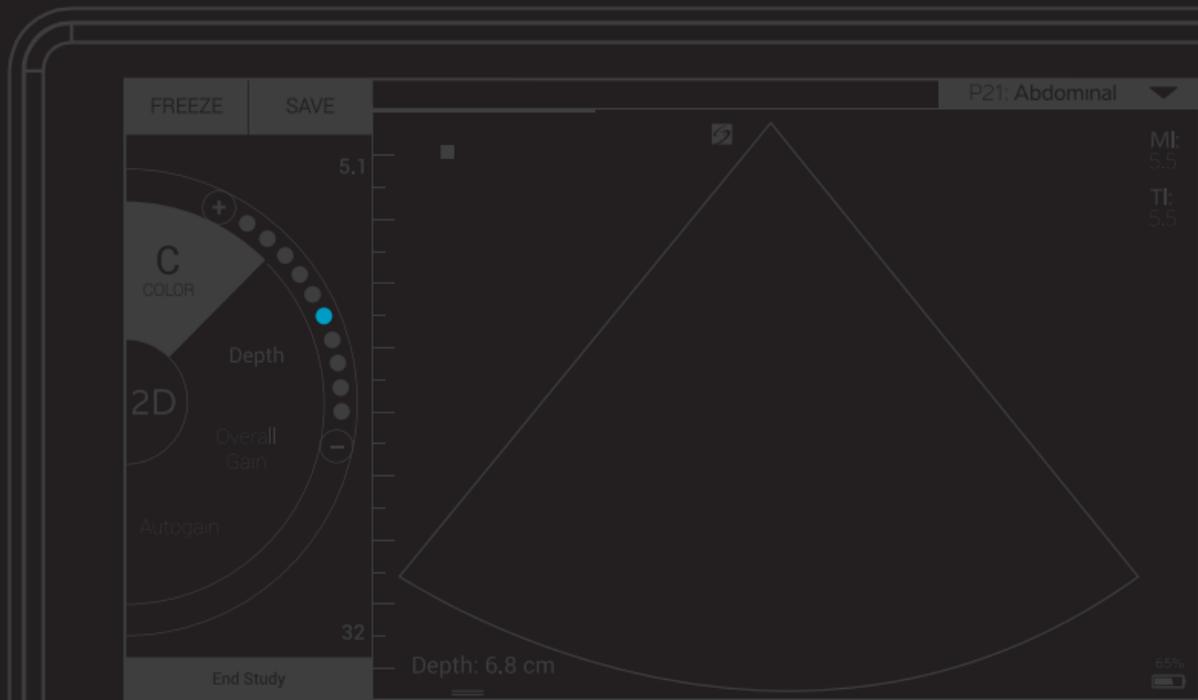


Lieferumfang:

- 2-in-1 Micro-USB-Stick (64 GB)
- Schutzhülle mit Griff und Seitenstütze
- iViz-Akku
- USB-Ladegerät
- Ladegerät mit Akkuschacht und Netzstromadapter

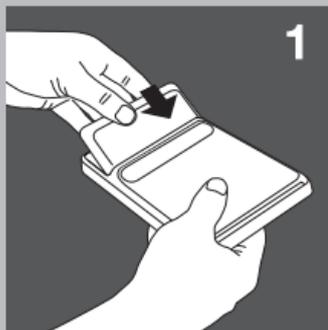


1 Einsetzen des Akkus

Setzen Sie den Akku in das iViz-System ein. Weitere Informationen zum Aufladen des Akkus finden Sie im Kapitel „Erste Schritte“ des *iViz-Benutzerhandbuchs*.

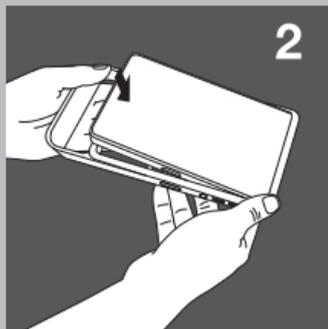


2 Einsetzen des Systems in die Schutzhülle

- Führen Sie das System in eine Seite der Schutzhülle ein.
- Ziehen Sie das andere Ende der Schutzhülle über das System, so dass es vollständig in der Schutzhülle sitzt.

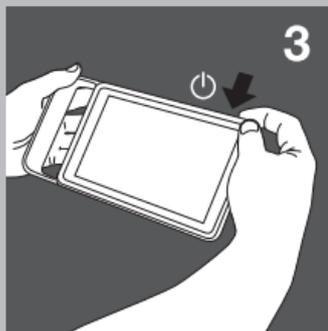


3 Erstmaliges Einschalten des iViz

- Betätigen Sie die Taste **EIN/AUS** und warten Sie einige Sekunden, bis das iViz eingeschaltet ist. Wischen Sie dann das **Schloss**-Symbol nach oben.
- Tippen Sie auf **Lernen**, um sich eine Liste der iViz-Videos anzeigen zu lassen. Sehen Sie sich **iViz entdecken** an, um eine schnelle Einführung in das System zu erhalten.
- Da es sich bei iViz um ein einzigartiges Ultraschallsystem handelt, das sich stark von anderen unterscheidet, empfehlen wir Ihnen dringend, sich auch alle weiteren Anleitungsvideos anzusehen.
- Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt ein. Überprüfen Sie regelmäßig das Datum und die Uhrzeit, insbesondere dann, wenn das System über zwei Wochen lang nicht benutzt wurde.

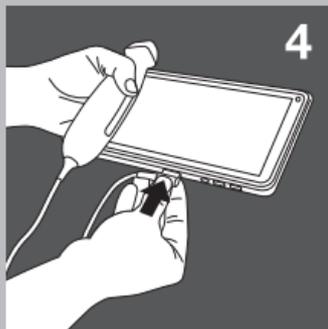

4 Anschließen des Schallkopfs

Setzen Sie den Schallkopfstecker unten in das iViz-System ein, bis ein Klicken zu hören ist (stellen Sie dabei sicher, dass der Schallkopfstecker in eine andere Richtung zeigt als die anderen Stecker).

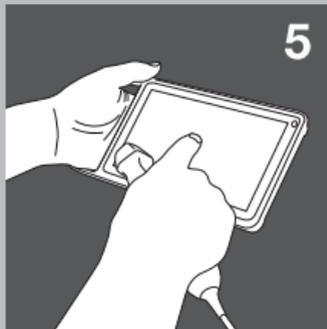


5 Erkunden des iViz

Vom iViz-Ausgangsbildschirm aus:

- Tippen Sie zum Eingeben von Patienteninformationen oder zum Anzeigen der Patientenliste auf **Patient**.
- Tippen Sie auf **Scannen**, um den Scan-Vorgang zu starten.
- Tippen Sie auf **Lernen**, um sich die Anleitungsvideos anzusehen oder mehr über Ultraschalltechniken zu erfahren.

Im Kapitel „Erste Schritte“ des *iViz-Benutzerhandbuchs* (zu finden im Modul **Lernen**, auf dem USB-Stick sowie auf www.sonosite.com) finden Sie weitere Informationen zu den allgemeinen Fingerbewegungen zur Interaktion und Bedienung des iViz (z. B. zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildschirms).

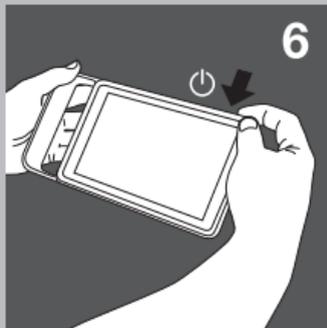

6 Ausschalten des iViz

- a Halten Sie die Taste **EIN/AUS** gedrückt.
- b Tippen Sie auf **Ausschalten**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und tippen Sie dann auf **OK**.

Drücken Sie kurz die Taste **EIN/AUS**, um das iViz in den Standby-Modus zu versetzen.