

FUJIFILM

SonoSite iViz

Mobility.
Clarity.
Connectivity.



SonoSite iViz

選任製造販売業者

株式会社 富士フイルムソノサイト・ジャパン

〒151-0053 東京都港区西麻布2-26-30

TEL: 03 (6418) 7190

外国特例認証取得者

FUJIFILM SonoSite, Inc. [米国]

(フジフイルム ソノサイト インク)

FUJIFILM

SONOSITE 及 iViz は各法域にて、FUJIFILM SonoSite, Inc.の商標及び登録商標として認められています。FUJIFILMは各法域にて、FUJIFILM Corporationの商標及び登録商標として認められています。その他の登録商標は各商標権取得者の財産です。



安全性に関する重要な情報は「超音波画像診断装置 iVizシリーズ ユーザーガイド」に記載されています。

CE
2797


P20270-02



FUJIFILM


SonoSite iViz

Quick Start Guide

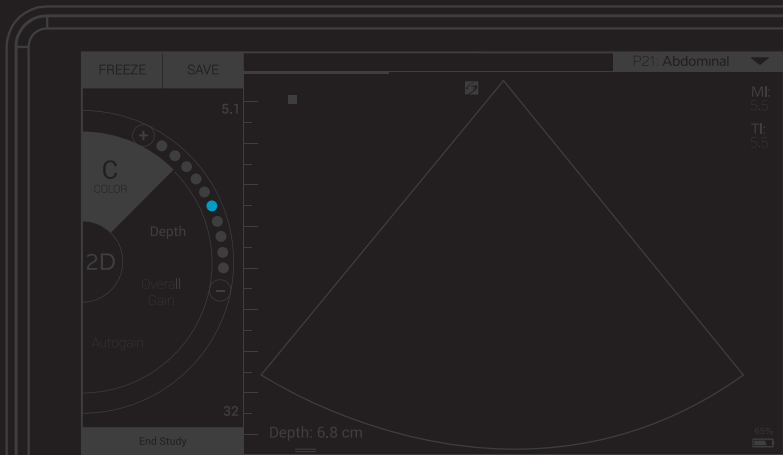

標準アクセサリ


- 2-in-1 マイクロUSBストレージ機器 (64GB)
- 取っ手・スタンド付き保護ケース
- バッテリー

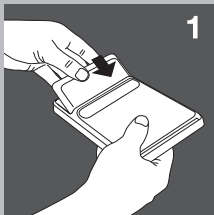

1 バッテリーの装着

iViz本体にバッテリーを挿入します。


バッテリーを充電する手順は、「超音波画像診断装置 iVizシリーズ ユーザーガイド」の<はじめに>の章を参照してください。

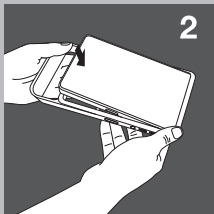

2 保護ケースの装着


a 保護ケースの片方に本体を差し込みます。

b 保護ケースのもう一方を本体の縁に引っ掛けるように持ち上げ、固定します。

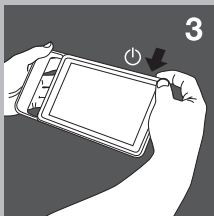

3 初めてiViz本体の電源を入れる

- a 電源ボタンを押し、iVizが起動するまで数秒待ちます。起動したら、ロックアイコンを上方向にスワイプします。
- b Learn (ラーニング) をタップしiVizビデオを開始します。
Exploring iVizをご覧ください。超音波画像診断装置iVizシリーズについて概要をご案内します。
- c 超音波画像診断装置iVizシリーズは他の超音波画像診断装置と異なります。Exploring iVizに加え、使用方法をご案内するハウツービデオを閲覧することを強く推奨します。
- d 正しい日付及び時間を設定します。定期的な日時が正確であることを確認してください。特にiVizを

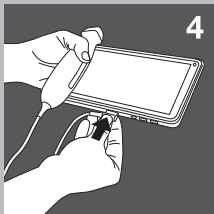

4 プローブの接続

プローブコネクタをiViz本体の下側面の接続部にカチッという音がするまで差し込みます。(プローブコネクタはその他のコネクタ部に向けないように注意してください。)

SonoSite iViz

5 iVizを経験する

iVizのホーム画面から、次の操作が可能です。

- Patient（患者）をタップし、患者情報を入力または患者リストを表示します。
- Scan（スキャン）をタップし、超音波スキャンを開始します。
- Learn（ラーニング）をタップし、ハウツービデオの閲覧、超音波技術について学習できます。

一般的な操作方法およびピンチやズーム等の指操作については「超音波画像診断装置 iVizシリーズ ユーザーガイド」の<はじめに>の章を参照してください。（本書はLearn（学習）モジュール、USBストレージ機器、及びwww.sonosite.com から入手可能です。）

6 iVizの電源を切る

- a 電源ボタンを長押しします。
- b Power Off（電源オフ）が表示されたら、タップします。次に、OKをタップします。スリープモードに切り替えるには、電源ボタンを押します。

