

FUJIFILM

SonoSite iViz

Мобильность.
Понятность.
Возможности
подключения.



SonoSite iViz

Производитель

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021, США

Тел.: 1-888-482-9449 или
1-425-951-1200

Факс: 1-425-951-1201

FUJIFILM

SONOSITE и iVIZ являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками компании FUJIFILM SonoSite, Inc. в различных юрисдикциях. FUJIFILM является товарным знаком и зарегистрированным товарным знаком FUJIFILM Corporation в различных юрисдикциях. Остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

© FUJIFILM SonoSite, Inc., 2019. Все права защищены.

Уполномоченное
представительство в ЕС

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Нидерланды

Партнер в Австралии

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road
BROOKVALE,
NSW, 2100, Австралия

CE
2797



Важную информацию по безопасности
см. в *руководстве пользователя iViz*.


P22812-03



FUJIFILM


SonoSite iViz

Краткое
руководство

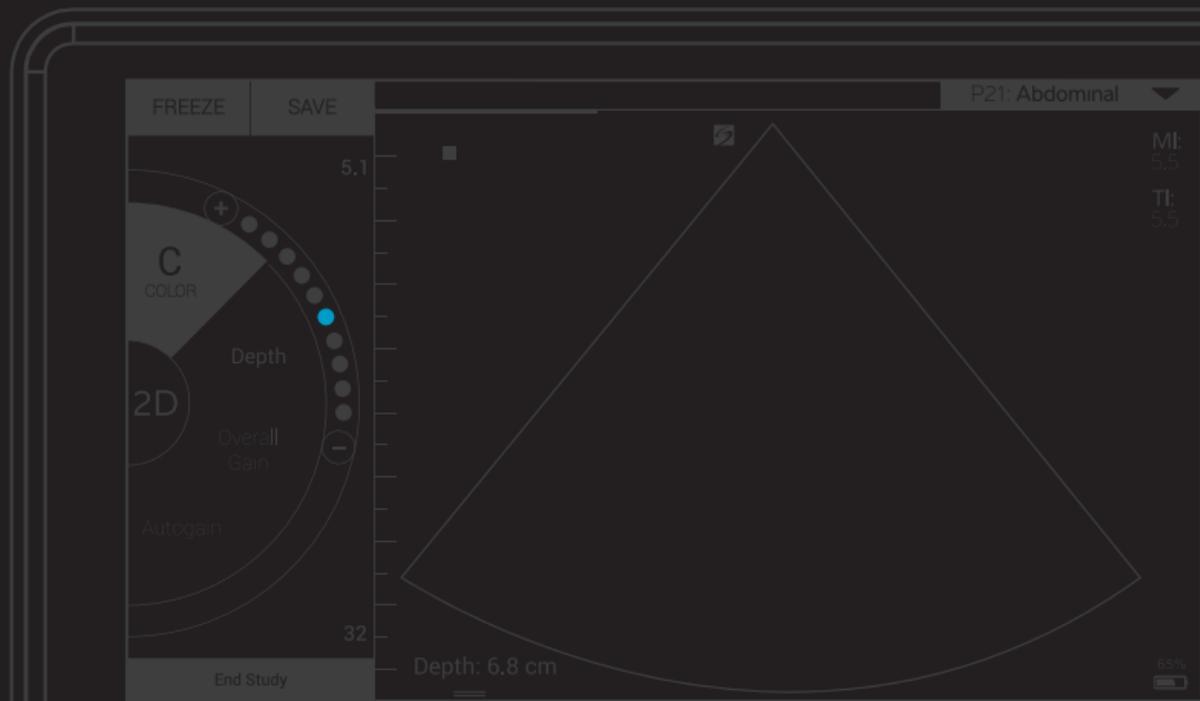


Содержимое коробки:

- Флэш-накопитель микро-USB 2-в-1 (64 ГБ) • Защитный футляр с ручкой и откидной ножкой-опорой • Аккумулятор iViz
- Зарядное устройство USB • Зарядное устройство для аккумуляторов с адаптером питания

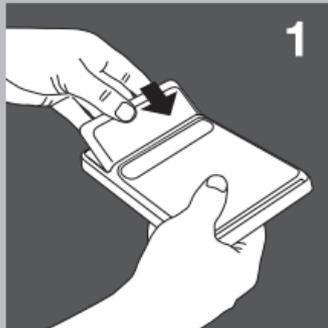


1 Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор в систему iViz. Сведения о зарядке аккумулятора см. в главе «Подготовка системы к работе» *руководства пользователя iViz*.

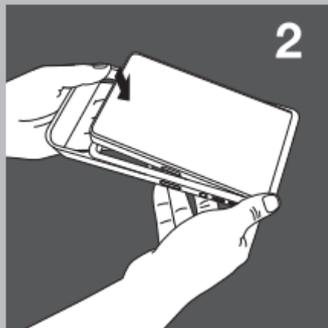


2 Помещение системы в защитный футляр

- Вставьте систему в один край футляра.
- Концы противоположного края наденьте на систему, чтобы зафиксировать ее.

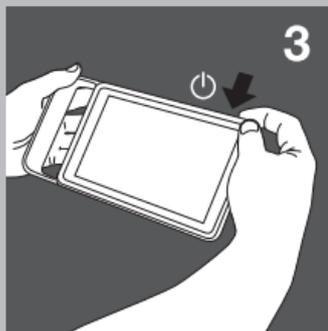

3 Первое включение iViz


- a** Нажмите кнопку **питания**, подождите несколько секунд, пока iViz включится, а затем проведите пальцем вверх по значку **блокировки**.
- b** Нажмите **Learn** (Обучение), чтобы открыть список видео iViz. Для быстрого ознакомления с системой посмотрите видео **Exploring iViz** (Что такое iViz).
- c** Поскольку iViz не похожа на другие ультразвуковые системы, настоятельно рекомендуем посмотреть и другие обучающие видео.
- d** Обязательно выполните настройку правильных даты и времени. Регулярно проверяйте дату и время, особенно если системой не пользовались более двух недель.

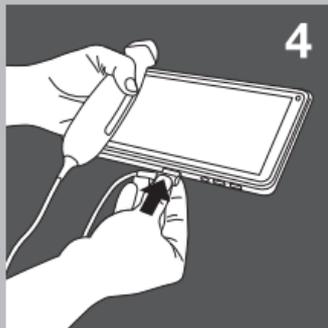

4 Подсоединение датчика

Вставьте разъем датчика в разъем в нижней части системы iViz (следите, чтобы разъем датчика был направлен в сторону от других разъемов) до щелчка.

SonoSite iViz

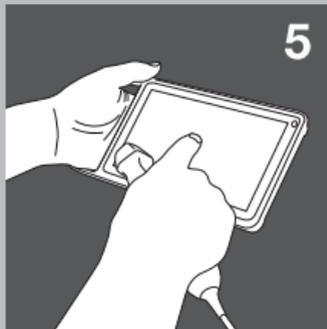


5 Знакомство с iViz

На главном экране iViz:

- Нажмите **Patient** (Пациент), чтобы ввести информацию о пациенте или открыть список пациентов.
- Нажмите **Scan** (Сканировать), чтобы начать сканирование.
- Нажмите **Learn** (Обучение), чтобы просмотреть обучающие видео или изучить методы ультразвуковой диагностики.

Сведения об общих принципах работы и использовании жестов (например, сведения и разведении пальцев) см. в главе «Подготовка системы к работе» *руководства пользователя iViz* (имеющегося в модуле **Learn** (Обучение), на флэш-накопителе USB и сайте www.sonosite.com).

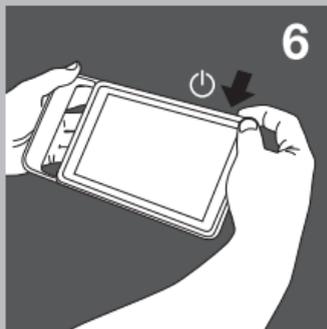

6 Выключение iViz

- а Нажмите и удерживайте кнопку **питания**.
- б При появлении сообщения нажмите **Power off** (Выключить питание), а затем **OK**.
Чтобы перевести iViz в режим ожидания, быстро нажмите кнопку **питания**.